

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BƠM TIÊM NHỰA KHÔNG KIM CÁC CỠ **Hãng sản xuất: Terumo Corporation** **Nước sản xuất: Nhật Bản**

CẢNH BÁO

- Sử dụng ngay sau khi xé bao gói sản phẩm
- Sau khi sử dụng, vứt bỏ đúng cách và an toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm.
- Xử lý cẩn thận để tránh kim đâm vào tay
- Không thay vỏ bọc sau khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Để mở bao gói sản phẩm: gỡ lớp bao bì trên của bao gói (hình 1)



THẬN TRỌNG

- Sản phẩm được khử trùng bằng chùm electron. Không tiệt trùng lại hoặc tái sử dụng.
- Không sử dụng nếu bao gói hoặc sản phẩm đã bị hư hỏng hoặc bị ô nhiễm.

KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM Ở NƠI CÓ ĐỘ ẨM VÀ NHIỆT ĐỘ CAO
TRÁNH TRỰC TIẾP DƯỚI ÁNH NẮNG MẶT TRỜI

Sử dụng một lần

Tiệt trùng - Không độc - Không có thuốc nhuộm - Không LATEX

Thương hiệu được đăng ký:

TERUMO CORPORATION

SẢN XUẤT BỞI: TERUMO CORPORATION TOKYO, JAPAN

色指定

1色

CF:0435

CF:0435 7~20%

色で表示している
文字・ケイ線等はアタリで
す。印刷しないでください。

入力倍率：100%

単位箱

274×185×130.5mm

