

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BƠM TIÊM NHỰA KHÔNG KIM CÁC CỖ **Hãng sản xuất: Terumo (Philippine) Corporation** **Nước sản xuất: Philippin**

CẢNH BÁO

- Sử dụng ngay sau khi xé bao gói sản phẩm
- Sau khi sử dụng, vứt bỏ đúng cách và an toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm.
- Xử lý cẩn thận để tránh kim đâm vào tay
- Không thay vỏ bọc sau khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Để mở bao gói sản phẩm: gỡ lớp bao bì trên của bao gói (hình 1)



THẬN TRỌNG

- Sản phẩm được khử trùng bằng chùm electron. Không tiệt trùng lại hoặc tái sử dụng.
- Không sử dụng nếu bao gói hoặc sản phẩm đã bị hư hỏng hoặc bị ô nhiễm.

KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM Ở NƠI CÓ ĐỘ ẨM VÀ NHIỆT ĐỘ CAO
TRÁNH TRỰC TIẾP DƯỚI ÁNH NẮNG MẶT TRỜI

Sử dụng một lần

Tiệt trùng - Không độc - Không có thuốc nhuộm - Không LATEX

IFU

TERUMO (PHILIPPINES) CORPORATION
SurFlo I.V Catheter Radiopaque

Instructions For Use

< INSTRUCTIONS FOR USE >

1. Open the case with a simple twisting motion to break the seal.
2. Remove the I.V. Catheter straight out of the case using two hands.
3. A box-shaped dent located on the upper surface of the flashback chamber is a needle bevel orientation indicator.
4. After confirming flashback at flashback chamber, advance the catheter and needle together a little further.
5. Advance the catheter into the vein.
6. Holding the catheter hub firmly, withdraw the needle.
7. Connect administration set and secure the devices safely.

TERUMO (PHILIPPINES) CORPORATION
Terumo Syringe without Needle

Instructions For Use

<INSTRUCTIONS FOR USE>

- To open blister package : Peel back top layer of packaging (Fig.1).

