

## Thời gian chất lượng để chăm sóc tốt hơn

"Thời gian chất lượng để chăm sóc tốt hơn" là lời hứa của thương hiệu Terumo Medical Care Solutions đối với mọi người tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe.



## LIFE CARE

# NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ

Chủng loại: ET\*C207S, ET\*C407S

### Hộp đựng dễ lau sạch nhờ thiết kế khéo léo.

Thiết kế mở giúp dễ lau sạch hơn và ngăn giữ lại dung dịch còn sót. Điều này cho phép bạn nhìn vào bên trong hộp để kiểm tra bụi bẩn và xem liệu nhiệt kế bên trong hộp đã TẮT chưa.



Cả nhiệt kế và hộp đựng đều có thể lau hoặc nhúng vào chất khử trùng.

- Các dung dịch khử trùng có sẵn
- Ethanol
  - Chlorhexidine gluconat
  - Benzalkonium clorua
  - Natri hypoclorit
  - Glutaraldehyde

Màn hình LCD lớn và rõ nét.

Trang thái đo và kết quả đo nhiệt độ được hiển thị trên màn hình lớn và với chữ lớn để dễ dàng kiểm tra

Bật hoặc Tắt nhiệt kế bằng cách lấy ra hoặc cất lại vào trong hộp đựng nhiệt kế.

Nhiệt kế được bật khi nó được lấy ra khỏi hộp đựng bảo vệ, sau đó có thể bắt đầu đo nhiệt độ ngay lập tức. Đặt nhiệt kế trở lại vào hộp đựng và nguồn bị tắt, điều này có thể tránh tiêu thụ pin một cách hiệu quả.

**NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ**  
ET\*C207S



Dễ khử trùng hơn.  
Hộp đựng này giúp dễ dàng lau chùi và vệ sinh.

Nhiệt kế điện tử thân thiện với người dùng và hợp vệ sinh.  
Đáp ứng tốt nhu cầu của bệnh viện.

## Thận trọng trong việc bảo trì và kiểm tra

- Nhiệt kế có khả năng chống nước, nhưng không nên ngâm trong chất lỏng một thời gian dài.
- Không khử trùng nhiệt kế bằng nước sôi (50°C hoặc cao hơn).
- Không lau bằng dung môi hữu cơ (như chất làm mòn), cresol hoặc povidone iodine. Việc sử dụng dung môi hữu cơ hoặc dung dịch khử trùng khác với những dung môi được chỉ định có thể gây hư hỏng, đổi màu và giảm chức năng sản phẩm. Ngoài ra, lau bằng povidone iodine có thể gây ra tình trạng sạm màu hơn.
- Cần chú ý đến các vấn đề sau. Nếu không, có thể gây ra sự cố.
  - Không tiệt trùng hoặc khử trùng sản phẩm này bằng khí, v.v.
  - Không sử dụng máy sấy tóc để làm khô nhiệt kế.
  - Không sử dụng phương pháp làm sạch bằng sóng siêu âm.

## Thông số kỹ thuật

ET\*C207S



ET\*C407S



Tên sản phẩm	NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ	
Phương pháp đo	Dự báo (Đo dự báo và đo trực tiếp đều có sẵn.) Phát hiện nhiệt độ: Nhiệt điện trở	
Mã sản phẩm	ET*C207S	ET*C407S
Mã số tiêu chuẩn Châu Âu	6927675515971	6927675515988
Vị trí đo nhiệt độ (Vị trí trên cơ thể)	Nách	Miệng/Trục tràng
Đối tượng dự kiến	Nách: Từ trẻ sơ sinh đến người lớn	Miệng: 5 tuổi Trục tràng: Từ trẻ sơ sinh đến người lớn
Dải đo nhiệt độ	+32.0 to +42.0°C	
Thời gian đo	Đo dự báo: trung bình khoảng 30 giây (25-40 giây) Đo trực tiếp: khoảng 10 phút.	Đo dự báo: trung bình khoảng 30 giây (25-40 giây) Đo trực tiếp: khoảng 5 phút.
Độ chính xác	+/- 0,1°C (Đo trực tiếp)	
Màn hình	Màn hình LCD 3 chữ số (Đơn vị hiển thị tối thiểu: 0,1°C)	
Pin	3V DC (1.5V LR41) x2	
Mức tiêu thụ điện	0.3 mW	
Phân loại	Nguồn điện cấp trong, loại BF, IPX7	
Tuổi thọ pin (Đo dự báo)	Khoảng 10.000 lần đo	
Thời gian sử dụng	5 năm	
Điều kiện hoạt động	Nhiệt độ: +10 đến +40°C Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ): +30 đến +85% Áp suất không khí: 700 đến 1060 hPa (70 đến 106kPa)	
Điều kiện bảo quản và vận chuyển	Nhiệt độ: -10 đến +50°C Độ ẩm tương đối (không ngưng tụ): +30 đến +95% Áp suất không khí: 700 đến 1060 hPa (70 đến 106kPa)	
Kích thước	129 mm (chiều dài) x 17,6 mm (chiều rộng) x 12,6 mm (độ dày)	
Trọng lượng	Khoảng 13.0g	
Thành phần	NHIỆT KẾ ĐIỆN TỬ, Hộp đựng, Hướng dẫn sử dụng / Thẻ bảo hành, Hỗ trợ kỹ thuật / Hướng dẫn xử lý	



Tất cả tên thương hiệu đều là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký thuộc sở hữu của TERUMO CORPORATION, các chi nhánh hoặc các bên thứ ba không liên quan.

©TERUMO CORPORATION 2024-04

**TERUMO**

**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM**

Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường  
Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.  
Điện thoại: +84 24 3936 1643  
Fax: +84 24 3936 1641

**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM**  
**Chi nhánh TP. HCM**

Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách Mạng  
Tháng Tám, phường 12, quận 10, TPHCM, Việt Nam.  
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành: 240003567/PCBB-HN

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam  
Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa,  
Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Terumo Medical Products (Hangzhou) Co., Ltd.

Sản xuất tại: Trung Quốc

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 051/24-CKQC-  
Terumo

TVME-2412-095