

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



SURPLUG AD Three-way stopcock

Khóa ba chạc có cổng tiêm không kim cho tiêm, truyền dịch

CÁC BIỂU TƯỢNG CHỈ DẪN

PVC Free

Không chứa PVC/ các thành phần gây tương tác thuốc



Tư vấn hướng dẫn sử dụng

LATEX Free

Không chứa Latex



Không tái sử dụng



Không chất gây sốt



Nhà sản xuất



Không sử dụng nếu bao bì sản phẩm đã bị hỏng

STERILE EO

Tiệt trùng bằng ethylene oxide

CHỈ ĐỊNH


Khóa ba chạc có cổng tiêm không kim cho tiêm, truyền dịch SURPLUG AD Three-way Stopcock được sử dụng như một cổng van kết nối với bộ dây truyền dịch hoặc các thiết bị tương tự để tiêm. Sản phẩm cũng được dùng để lấy mẫu máu và truyền máu. SURPLUG AD Three-way Stopcock có đường dẫn dịch để ngăn ngừa việc đong thuốc.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Mũi tên dưới đây chỉ đường dẫn dịch. Tùy vào mục đích sử dụng mà điều chỉnh vị trí của khóa chạc ba. Bằng cách xoay vị trí của khóa đầu nối, đường dịch sẽ xoay chuyển.

Giữ vị trí khóa chạc ba như hình 1c để ngăn ngừa việc ứ đọng thuốc trong đường truyền dịch ngay cả khi cổng van của thiết bị không được sử dụng.

Điều chỉnh vị trí khóa chạc ba như hình 2 để ngăn đường dẫn dịch theo mọi hướng,

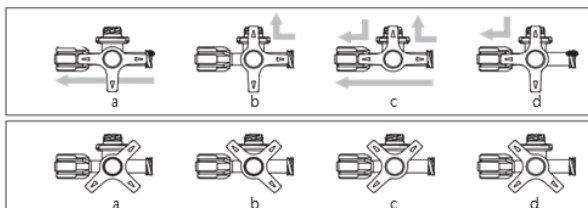

CẢNH BÁO

Khử trùng cổng van SURPLUG AD Three-way stopcock trước khi sử dụng.

Để áp dụng khóa Heparin, đóng đường truyền vào bệnh nhân bằng xoay van khóa trước khi rút kim tiêm. Trong khi sử dụng heparin, không mở lại đường truyền dịch đã đóng.

THẬN TRỌNG

- Hạn dùng 1 lần. Không tái sử dụng
- Không tiệt trùng lại
- Không sử dụng đầu kim để tiêm thuốc
- Vui lòng không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hỏng

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Đảm bảo rằng thiết bị được kết nối trước khi sử dụng
- Cài đặt vị trí khóa chạc ba ở vị trí mở và kết nối với cổng van của thiết bị.
- Khi kết nối với đầu nối mở (a male luer connector) với cổng van của thiết bị, đảm bảo rằng có thể đèn và tháo thiết bị thẳng hàng. Không kết nối ở các góc hoặc vị trí xoắn quá mức
- Không sử dụng thiết bị nếu có bộ phận bị hư hỏng
- Đảm bảo trong quá trình sử dụng thiết bị không không bị đứt gãy, mất kết nối hoặc rò rỉ thuốc
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm cần tiêm áp lực cao.
- Không kết nối đầu nối có cạnh sắc với cổng van của thiết bị
- Khi sử dụng đầu nối có vết lồi xung quanh đầu, đầu nối có cạnh sắc hoặc một đầu nối có gờ trên cạnh, đảm bảo rằng đường dẫn dòng được nguyên vẹn trước khi bắt đầu tiêm, vì cổng van SURPLUG AD Three-way Stopcock thể vẫn đóng

BẢO QUẢN

Không bảo quản trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao

HẠN DÙNG

Xem hạn dùng trên bao bì ngoài sản phẩm

TERUMO

TERUMO MEDICAL PRODUCTS (HANGZHOU) CO., LTD.
M4-9-5 Hangzhou Economic and Technological Development Zone, 310018 Hangzhou, P.R.CHINA