

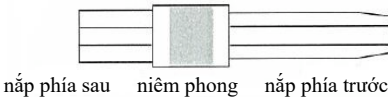
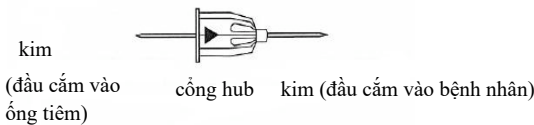
Số U MDNS 20205 Kim tiêm, nha khoa LoạiIIa, Quy tắc 6

Kim nha khoa**CHỈ SỬ DỤNG MỘT LẦN** **【Những điều bị cấm】**

- Không tái sử dụng, tiệt trùng lại để tránh lây nhiễm và làm hỏng chức năng sản phẩm.
- Không được uốn cong.
[Có thể làm gãy kim]

【Đặc điểm, cấu trúc và hệ thống】

<bản vẽ thành phần>

**【Mục đích sử dụng】**

- Sản phẩm này được sử dụng trong gây tê nha khoa, được cắm vào ống tiêm nha khoa.
- Chỉ dành cho các bác sĩ được sử dụng
- Sản phẩm vô trùng

STERILE EO

【Hướng dẫn sử dụng】

1. Đeo găng tay trước khi thao tác
2. Xoáy nắp kim để làm rách niêm phong.
3. Kéo nắp đẩy ra và cắm phần tiếp xúc với ống tiêm và ống tiêm.
4. Rút nắp đầu kim ra để sử dụng.

Thận trọng

Nhỏ vài giọt dịch tiêm ra khỏi đầu kim trước khi dùng [Kim có thể bị tắc do mảnh cao su từ ống tiêm]

【Thận trọng khi sử dụng】

1. Thận trọng rất quan trọng và cơ bản.
 - Sử dụng sau khi đã kiểm tra các sản phẩm thuốc hoặc thiết bị y tế được sử dụng cùng.
 - Không sử dụng nếu niêm phong hoặc bao bì bị rách hoặc bẩn hoặc sản phẩm có bất kỳ hư hỏng nào.
 - Sử dụng ngay sau khi làm mất niêm phong.

- Khi đóng nắp lại, tránh để đầu kim chạm vào nắp bảo vệ.
[Kim có thể đâm xuyên qua tấm bảo vệ.]
- Không chạm trực tiếp vào kim.
[Có thể bị lây nhiễm]
- Không để kim trong chất lỏng (dịch tiêm) trong thời gian dài.
[Kim có thể bị tắc bởi chất lỏng kết tinh. (dịch tiêm).]
- Thái độ thiết bị một cách an toàn và không chạm vào kim để tránh lây nhiễm sau khi dùng.

2. Thận trọng khi sử dụng

- Không xoay quá mạnh khi cắm kim vào ống tiêm nha khoa.
- Chắc chắn sản phẩm được cắm chặt, không bị lỏng khi sử dụng. Đảm bảo kim không bị lỏng, tuột và rò rỉ khi sử dụng.
- Tránh để đầu kim chạm vào tấm bảo vệ khi đóng nắp để tránh vô tình đâm thủng.
[Kim có thể đâm xuyên qua tấm bảo vệ.]

【Hướng dẫn bảo quản và ngày hết hạn】**1 Hướng dẫn bảo quản**

- Bảo quản ở nơi an toàn, không có nước, ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp, nhiệt độ, độ ẩm cao và có hóa chất.

2. Hết hạn

- Tuân thủ ngày hết hạn trên nhãn sản phẩm

【Quy cách đóng gói】

100 chiếc hộp



MISAWA MEDICAL INDUSTRY CO., LTD.
1320-5, Nagatoro, Kasama-shi, Ibaraki-ken 309-1712, Japan



Emergo Europe
Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague The Netherlands