

Đơn giản, an toàn & chất lượng cho mọi người

**CAPJECT™**



## Đơn giản

- Ba bước
- Về mặt thiết kế, có hình dạng tiện lợi
- Sử dụng một tay
- Giảm thời gian đào tạo

## An toàn

- Sử dụng một lần, không có nguy cơ nhiễm trùng
- Kim lấy máu thu vào tự động
- Dễ nhìn thấy để lắp đặt chính xác
- Khử trùng theo tiêu chuẩn ISO 11137

# Hướng dẫn sử dụng an toàn kim lấy máu mao mạch



## Bước 1

## Kéo

Sau khi làm sạch vị trí lấy máu, vặn nắp bảo vệ kim hoặc kéo nắp ra và để vào thùng rác.



## Bước 2

## Đặt kim


Đặt kim vào vị trí lấy máu như hình minh họa.



## Bước 3

## Ấn nút

Ấn nút trắng để kim đâm qua da. Thải bỏ kim vào thùng chứa vật sắc nhọn phù hợp.

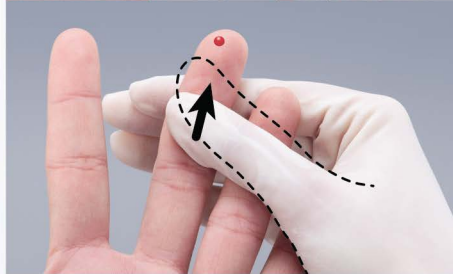

## Bước 4

Nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay gần chỗ đâm kim để lấy thể tích máu cần thiết

Tham khảo nhãn sản phẩm và tờ hướng dẫn sử dụng để biết các cảnh báo, thận trọng, biến chứng có thể gặp, và các hướng dẫn sử dụng.

<b>Mã sản phẩm</b>	200106	<b>Chiều sâu</b>	1,25mm
<b>Loại</b>	Dùng một lần, loại ấn nút	<b>Màu kim</b>	Hồng
<b>Gauge</b>	30G	<b>Đóng gói</b>	200 kim lấy máu/hộp 10 hộp kim/thùng – 2000 kim lấy máu
<b>Vật liệu</b>	Thân kim (holder): Polyethylene tỷ trọng cao (HD-PE); Kim lấy máu: Polyethylene tỷ trọng thấp (LD-PE) + SUS304; Lò xo: Polyoxymethylene (POM)		

### Terumo Vietnam Medical Equipment Co., Ltd.

14th and 16th Floor, Geleximco Building,  
36 Hoang Cau Street, O Cho Dua Ward,  
Dong Da District, Hanoi Vietnam  
+84-24-3936-1643

### Terumo Singapore Pte. Ltd.

300 Beach Road #33-06 The Concourse Singapore 199555  
+65-6-291-3603

### PT. Terumo Indonesia

Wisma KEIAI 5th Floor JL. Jend.  
Sudirman KAV. 3 Jakarta 10220 Indonesia  
+62-21-572-4071

### Terumo (Thailand) Co., Ltd.

No.88 The PARQ Building, Unit 8W9-16, 8th Floor,  
Ratchadaphisek Road, Klongtoey Subdistrict, Klongtoey District,  
Bangkok 10110 Thailand  
+66 2111 2133

### Terumo Marketing Philippines Inc.

3203 West Tower, Pse Centre Exchange Road, Ortigas Center  
Pasig City, Philippines  
+63-2-8632-1674

### Terumo Singapore Pte. Ltd. (Yangon Branch)

Room no. 1220, 12th Floor, Myanmar Centre Business Suites,  
Myanmar Centre Tower 2, 192 Kaba Aye Pagoda Road,  
Bahan Township, Yangon, Myanmar  
+95-1-934-5065 (Ext.1228)

Không phải tất cả các thông số kỹ thuật được mô tả trong catalogue này đều được đăng ký và phê duyệt để đưa ra thị trường ở tất cả các nước và khu vực chỉ định sử dụng có thể khác nhau theo quốc gia và khu vực. Vui lòng liên hệ đại diện của ở quốc gia của bạn để Terumo ở quốc gia của bạn để biết thông tin và tình trạng sẵn có của sản phẩm.



**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM**  
Tầng 14, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, phường Ô  
Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.  
Điện thoại: +84 24 3936 1643  
Fax: +84 24 3936 1641

**CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT NAM**  
Chi nhánh TP. HCM  
Phòng 4, Tầng 4, Tháp A, Tòa nhà Viettel, 285 Cách  
Mạng Tháng Tám, phường 12, quận 10, TP HCM, Việt  
Nam.  
Điện thoại: +84 28 6660 0326

Số lưu hành: 220001253/PCBB-HN

Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH Thiết bị y tế Terumo Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Hãng sản xuất: Asahi Polyslider Company, Limited

Sản xuất tại: Nhật Bản

Số văn bản công khai nội dung và hình thức quảng cáo: 004/25-

CKQC-Terumo

TERUMO là một nhãn hiệu của TERUMO CORPORATION.

®: Nhãn hiệu đã đăng ký © TERUMO CORPORATION. Tháng 8 năm 2018.