

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế tiếng Việt

(Tài liệu hướng dẫn sử dụng áp dụng cho các mã hàng:

SS+01T; SS+05L; SS+10L; SS+10ES; SS+20ES; SS+20L; SS+05S; SS+10S)

TERUMO (PHILIPPINES) CORPORATION
Bơm tiêm nhựa không kim

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

<CẢNH BÁO>

- Sử dụng ngay sau khi xé bao gói sản phẩm
Sau khi sử dụng, vứt bỏ đúng cách và an toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm.
- Xử lý cẩn thận để tránh kim đâm vào tay
Không thay vỏ bọc sau khi sử dụng.

<HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG >

Để mở bao gói sản phẩm: gỡ lớp bao bì trên của bao gói (Hình 1)



<CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA>.

- Không sử dụng nếu bao gói hoặc sản phẩm đã bị hư hỏng hoặc bị ô nhiễm.
- Không sử dụng để tiêm chất cản quang với áp lực cao.
- Bảo quản từ 2°C đến 30 °C. Bảo quản nơi khô ráo. Tránh xa ánh nắng mặt trời. Để vỡ, cẩn thận khi sử dụng.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế tiếng Việt

*Tài liệu hướng dẫn sử dụng áp dụng cho các mã hàng:
(SS+03L; SS+03S)*

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BƠM TIÊM NHỰA KHÔNG KIM **Hãng sản xuất: Terumo (Philippine) Corporation** **Nước sản xuất: Philippin**

CẢNH BÁO

- Sử dụng ngay sau khi xé bao gói sản phẩm
- Sau khi sử dụng, vứt bỏ đúng cách và an toàn để tránh nguy cơ lây nhiễm.
- Xử lý cẩn thận để tránh kim đâm vào tay
- Không thay vỏ bọc sau khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Để mở bao gói sản phẩm: gỡ lớp bao bì trên của bao gói (hình 1)



CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Sản phẩm được khử trùng bằng chùm electron. Không tiệt trùng lại hoặc tái sử dụng.
- Không sử dụng nếu bao gói hoặc sản phẩm đã bị hư hỏng hoặc bị ô nhiễm.

KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM Ở NƠI CÓ ĐỘ ẨM VÀ NHIỆT ĐỘ CAO
TRÁNH TRỰC TIẾP DƯỚI ÁNH NẮNG MẶT TRỜI

Sử dụng một lần

Tiệt trùng - Không độc - Không có chất gây sốt - Không LATEX