

色指定

1 色 黒 black

色表示の文字、線
框等内容不用印刷。

放大倍率 (Tỷ lệ) : 100%

说明书

210mm × 297mm


2023-05/Rev.1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ET



Digitally signed by
CÔNG TY TNHH THIẾT
BỊ Y TẾ TERUMO VIỆT
NAM
DN: c=VN, st=THÀNH
PHỐ HÀ NỘI, cn=CÔNG
TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ
TERUMO VIỆT NAM,
o.9.2342.19200300.100,
1.1=MST:0105881933
Date: 2023.07.10
14:41:34 +07'00'

Mã bảo hành Terumo

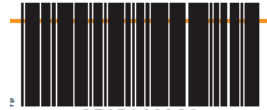

MD CE 0123

DÂY NỐI DÀI BƠM TIÊM ĐIỆN

SAFEED EXTENSION TUBE

Sản phẩm này là dây nối dài dùng một lần chủ yếu làm từ nhựa PVC, ABS. Nó có tính đàn hồi và độ dẻo rất tốt, trơn mịn và độ trong suốt cao.

- Sản phẩm chỉ định sử dụng một lần, không tái khử trùng hoặc tái sử dụng.
- Không sử dụng nếu sản phẩm bị nhiễm bẩn hoặc bị hỏng; không sử dụng nếu bao bì bị hở
- Sử dụng ngay sau khi mở bao bì, thải bỏ sau khi sử dụng.
- Hủy bỏ an toàn sau khi dùng như là chất thải y tế theo hướng dẫn của cơ sở y tế để ngăn ngừa các nguy cơ nhiễm khuẩn.

[DANH SÁCH MÃ SỐ MỤC SẢN PHẨM]


SF*ET2022	SF*ET0525	SF*ET1725	SF*ET3825
SF*ET2527	SF*ET5527	SF*ET1020	SF*ET3520
SF*ET2022L	SF*ET0525L	SF*ET1725L	SF*ET3825L
SF*ET2527L	SF*ET5527L	SF*ET1020L22	SF*ET3520L22
SF*ET2022L22	SF*ET0727L22	SF*ET152EL22	SF*ET2527L22
SF*ET152E	SF*ET1725L22	SF*ET5527L22	SF*ET0222L22

[HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG]

1. Lấy dây nối dài SAFEED ra khỏi bao bì bằng phương thức vô trùng.
2. Siết chặt kết nối với đầu nối đầu luer.

[CẤU TRÚC SẢN PHẨM]

Sản phẩm này chủ yếu bao gồm các phụ kiện nối dương hình nón hoặc khóa phụ kiện, ống dẫn, phụ kiện nối âm hình nón, nắp hoặc đầu bảo vệ hình nón hoặc nắp khóa; cách bố trí phác thảo như sau:

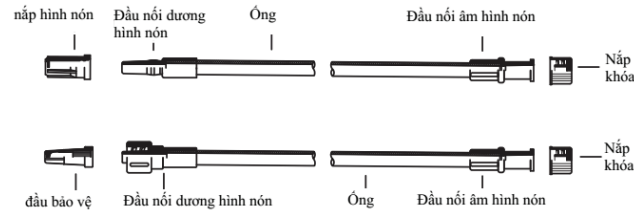

[NGÀY HẾT HẠN]

- Thời hạn sử dụng của sản phẩm này là 5 năm.

[BẢO QUẢN]

Không bảo quản ở nhiệt độ và độ ẩm cao. Tránh ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp.

[BÁO CÁO SỰ CỐ]

- Nếu trong quá trình sử dụng thiết bị hoặc kết quả của việc sử dụng thiết bị gây ra những sự cố nghiêm trọng, vui lòng báo cáo với nhà sản xuất và/hoặc cơ sở đại diện và chính quyền ở quốc gia bạn.

[CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG]

Sản phẩm này chủ yếu sử dụng để nối dài đường truyền trong gây mê hoặc truyền tĩnh mạch.

[BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA]

- Không sử dụng để truyền máu.
- Hãy tránh để dung dịch dính vào bề mặt của các phụ kiện hình nón, hoặc các khớp nối có thể bị lỏng.
- Để tránh gây ra vết nứt trong các phụ kiện hình nón, vui lòng làm theo hướng dẫn như sau:
 - a. Không dùng thuốc có chứa cồn để khử trùng các khớp nối;
 - b. Không sử dụng thuốc có chứa chất cản quang tan trong dầu hoặc cồn.
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm với đường tiêm áp lực cao (ví dụ như chất cản quang mạch máu) vì nó có thể gây tổn thương.

TERUMO MEDICAL PRODUCTS (HANGZHOU) CO., LTD.
M4-9-5 Hangzhou Economic and Technological Development Zone, 310018 Hangzhou, P.R.CHINA
SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC

TERUMO EUROPE N.V.
Interleuvenlaan 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
www.terumo-labeling.com

Nhà tài trợ Úc **Terumo Australia Pty Ltd**
Macquarie Park NSW 2113 Australia

Tham khảo hướng dẫn sử dụng	Không sử dụng nếu bao bì hỏng và cần tham khảo hướng dẫn sử dụng	Không được tái sử dụng
Không có chất gây sát	Tiệt trùng bằng etylen oxid Hệ thống bảo vệ vô khuẩn duy nhất	
Không được tái tiệt trùng	Đại diện ủy quyền ở Cộng đồng châu Âu	Không chứa DEHP
Mã sản phẩm	Số lô	Ngày hết hạn
Cơ sở sản xuất	Ngày sản xuất	Thiết bị y tế
Nhà nhập khẩu	Nhận dạng thiết bị duy nhất	



Tất cả thương hiệu là thương hiệu hoặc thương hiệu được đăng ký thuộc sở hữu của TERUMO CORPORATION, chi nhánh hoặc các bên thứ ba không liên quan. © TERUMO CORPORATION 05/2023