

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

Bơm tiêm vô trùng, dùng một lần được chỉ định để tiêm insulin cho bệnh nhân đái tháo đường

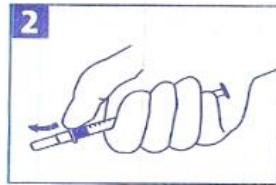
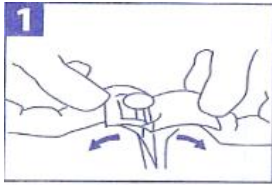
THÀNH PHẦN

Bơm tiêm insulin vô trùng, dùng một lần gồm các thành phần sau:

Thành phần	Vật liệu
Thân và đuôi bơm tiêm	Polypropylene
Nắp kim	Polyethylene
Pittong (Gioăng cao su)	Isoprene Rubber
Chất bôi trơn của kim	Silicone

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

- Mở - tách lớp giấy khỏi lớp nhựa bằng cách cầm phần tab và kéo nó ra bằng hai tay.
- Bơm tiêm insulin Taechang rất sắc và trơn nên đặc biệt thận trọng khi tháo nắp bơm tiêm để tránh làm hỏng hoặc cùn đầu kim
- Nên đặt bơm tiêm giữa ngón trỏ và ngón cái rồi dùng ngón cái đẩy nhẹ để tháo nắp kim.
- Khuyến cáo không nên kéo nắp kim ra khỏi ống tiêm, việc này sẽ làm hỏng đầu kim.
- Hút dung dịch vào bơm tiêm và sử dụng theo hướng dẫn của bác sĩ.

**⚠ CẢNH BÁO**

Đối với bệnh nhân tiêm trộn hai loại Insullin, không được thay đổi:

- Thứ tự pha thuốc mà bác sĩ đã chỉ định, hoặc
- Chủng loại và thương hiệu của bơm tiêm hoặc kim tiêm, mà không xin ý kiến bác sĩ/ dược sĩ.
- Không tuân theo cảnh báo này có thể gây sai về liều lượng.

THẬN TRỌNG KHI SỬ DỤNG

- Đề bơm tiêm trong bao bì trước khi sử dụng.
- Sử dụng ngay sau khi mở bao bì.
- Nếu niêm phong vô trùng bị rách, sản phẩm có thể không còn vô trùng và không được sử dụng.
- Không sử dụng nếu sản phẩm hoặc bao bì bị hỏng.
- Không tiệt trùng lại.
- Sản phẩm dùng một lần: chỉ được sử dụng 1 kim cho một bệnh nhân. Việc tái sử dụng sẽ gây rủi ro cho người dùng và bệnh nhân, bao gồm việc lây nhiễm và chấn thương do kim không còn vô trùng và dễ gãy.
- Trước khi thay đổi kim ngắn hơn, cần tham khảo ý kiến bác sĩ.

BẢO QUẢN

- 5 năm kể từ ngày sản xuất
- Không sử dụng bơm tiêm nếu đã quá hạn sử dụng ghi trên bao bì.
- Bảo quản ở nhiệt độ phòng, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp và độ ẩm.

THẢI BỎ

Thải bỏ kim tiêm theo quy định tại địa phương. Không xử lý kim tiêm như rác thải thông thường. Không thải bỏ bơm tiêm ra ngoài môi trường.

MÔ TẢ CÁC BIỂU TƯỢNG TRÊN NHÃN

Biểu tượng "Nhà sản xuất"



Biểu tượng "Đại diện được ủy quyền tại Châu Âu"



Biểu tượng "Hạn sử dụng"



Biểu tượng "Ngày sản xuất"



Biểu tượng "Chú ý, Xem hướng dẫn sử dụng"



Biểu tượng "Tuân thủ hướng dẫn sử dụng"



Biểu tượng "Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng"



Biểu tượng "Không tái sử dụng"



Biểu tượng "Số lô"



Biểu tượng "Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxid"



Biểu tượng "Tránh ánh nắng mặt trời"



Biểu tượng "Để nơi khô ráo"



Biểu tượng "Nhiệt độ phòng 1~30°C"



Biểu tượng "Tiêu chuẩn Châu Âu, phê duyệt bởi tổ chức SGS"



Biểu tượng "Hàng dễ vỡ"



Biểu tượng "Không dùng móc"

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

- Bảo quản nơi khô ráo
- Tránh ánh nắng mặt trời
- Bảo quản ở nhiệt độ dưới 30 độ C.

CE 1639 SGS Belgium NV, Notified Body 1639



KTR Europe GmbH

Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany

Phone : +49 (0)6196-887170

Manufactured by TaeChang Industrial Co., Ltd.

(Head Office) 8-18, Bojeokdong-gil Useong-myeon, Gongju-si, Chungcheongnam-do, Korea

(Gumi Plant) 127, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea