



Thành phần

Bút bấm kim lấy máu đo đường huyết MEDISAFE FINETOUCH II có chốt lên kim.

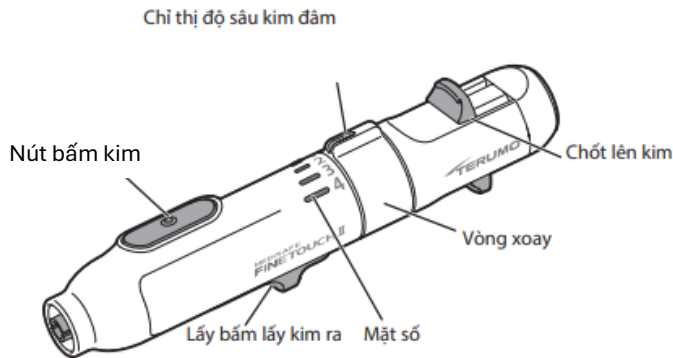

Bút bấm kim lấy máu đo đường huyết MEDISAFE FINETOUCH II không có chốt lên kim

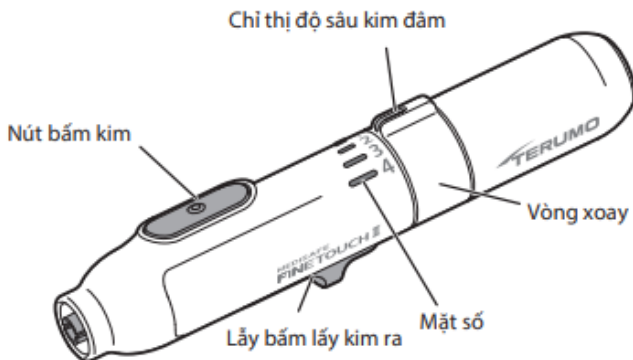

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Tham khảo ý kiến của bác sĩ, điều dưỡng hoặc dược sĩ khi cần bất kỳ lời khuyên hoặc thông tin về thiết bị, khi gặp khó khăn hoặc nghi ngờ thiết bị có thể gây nên một tác dụng không mong muốn.

Mục đích sử dụng

Bút bấm kim lấy máu đo đường huyết MEDISAFE FINETOUCH II được dùng để lấy máu mao mạch đầu ngón tay hoặc daί tai hoặc gót chân với kim lấy máu FINETOUCH sử dụng 1 lần.

Chỉ định

Bút bấm kim lấy máu đo đường huyết MEDISAFE FINETOUCH II được chỉ định sử dụng khi cần lấy mẫu máu mao mạch để đo đường huyết.

Chống chỉ định

Không

Nhóm bệnh nhân mục tiêu

Người được yêu cầu lấy mẫu máu mao mạch

Người dùng mục tiêu

Bút bấm kim lấy máu đo đường huyết MEDISAFE FINETOUCH II nên được sử dụng bởi chuyên gia sức khỏe hoặc bệnh nhân dưới chỉ định của bác sĩ.


Lợi ích lâm sàng

Bút bấm kim lấy máu đo đường huyết MEDISAFE FINETOUCH II có lợi ích lâm sàng gián tiếp-tác dụng y tế gián tiếp vì được sử dụng để thu thập mẫu máu mao mạch để đo đường huyết.


Thận trọng

- Không tháo rời Bút bấm kim MEDISAFE FINETOUCH II
- Không sử dụng hoặc thay thế Bút bấm kim MEDISAFE FINETOUCH II nếu thiết bị, đặc biệt là phần đầu lắp kim bị biến dạng hoặc hỏng, ngừng sử dụng và thay thế Bút bấm kim MEDISAFE FINETOUCH II mới.
- Trước khi đâm kim, làm sạch mặt đâm kim, hoặc khử trùng bằng bông tẩm cồn
- Đảm bảo không để máu hoặc thiết bị có rây máu, kể cả giấy ăn, các vật dụng khác được dùng khi lấy máu tiếp xúc với người khác.


Hình 1

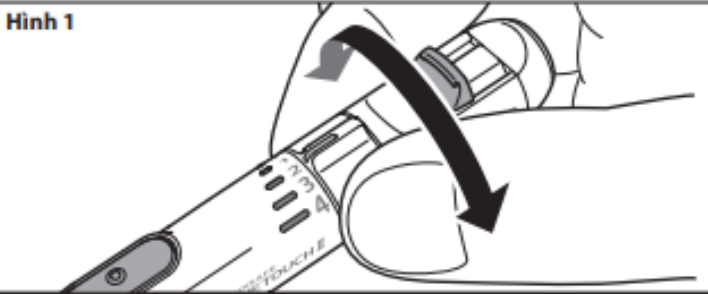


Hình 2

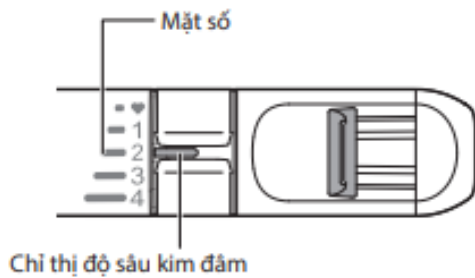


Hình 3

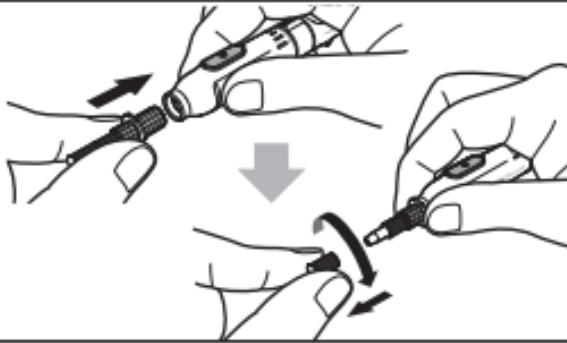


Hình 4

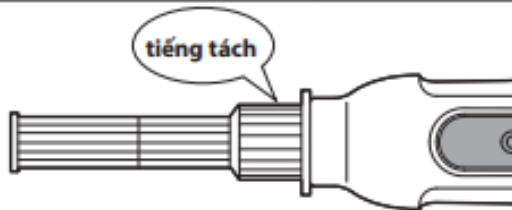

Hình 5

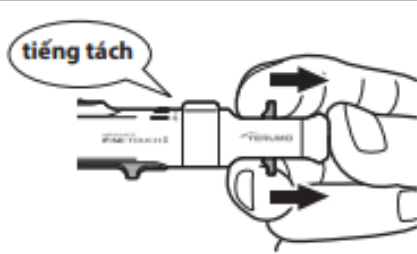

Hình 6

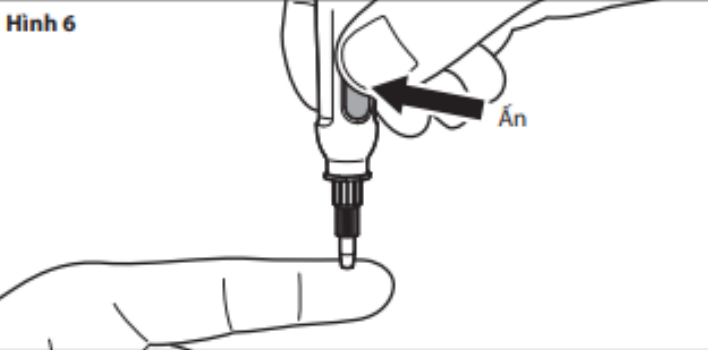

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Không lưu kim lấy máu đã dùng trong bút bấm kim MEDISAFE FINETOUGH II. Vì có thể làm hỏng thiết bị hoặc chức năng điều chỉnh độ đâm sâu.

Một số lưu ý với kim lấy máu MEDISAFE FINETOUGH II

- Chỉ sử dụng 1 lần. Không sử dụng lại. Không tiệt trùng lại. Không xử lý lại
- Việc xử lý lại có thể làm mất tính tiệt trùng, tương thích sinh học và tính toàn vẹn chức năng của thiết bị.

Hướng dẫn sử dụng

1. Trước khi đâm kim, lau sạch mặt đâm kim bằng bông hoặc gạc tẩm cồn
2. Xoay vòng để chọn độ đâm sâu qua da. Có thể chọn 5 mức khác nhau (Hình 1)

- Cho da mềm hoặc mỏng (độ đâm kim nông..... ♥ , 1
- Da thường..... 2,3
- Da cứng hoặc dày (độ đâm kim sâu).....4

Thận trọng khi sử dụng

- Không đặt chỉ thị độ sâu kim ở giữa hai mức
- Đảm bảo chỉ thị độ sâu kim đâm chỉ đúng số trên vòng xoay (Hình 2)
- Bắt đầu với độ đâm kim nông để tìm ra độ sâu phù hợp.

3. Gắn kim lấy máu vào bút bấm kim MEDISAFE FINETOUGH II. Vặn và rút nắp kim ra (Hình 3)

Thận trọng khi sử dụng

- Chỉ sử dụng với kim lấy máu FINETOUGH
 - Không sử dụng kim lấy máu khi bao gói bị hỏng, không có nắp kim, kim bị hỏng hoặc có bất cứ khuyết điểm nào.
 - Khi gắn kim vào bút MEDISAFE FINETOUGH II, lưu ý hướng gắn kim phải thẳng.
 - Lắp và ấn kim lấy máu vào bút tới khi nghe thấy tiếng tách; đảm bảo không nhấn vào nút "Push" (hình 4)
 - Nếu vô tình nhấn vào nút "Push", giữ kim đã được gắn vào bút, rồi kéo chốt lên kim tới khi nghe thấy tiếng tách (chỉ áp dụng với bút bấm kim MEDISAFE FINETOUGH II có chốt lên kim, Hình 5) hoặc thay kim mới.
 - Không lắp lại khi kim đã được đẩy ra khỏi bút bấm kim MEDISAFE FINETOUGH II. Nếu lắp lại, thì đầu kim sẽ lộ ra và không nghe thấy tiếng tách. Thay kim lấy máu mới.
4. Đặt kim lấy máu vào vị trí lấy máu, ấn nút "Push" (Hình 6)

- Sau khi đâm kim, ép từ từ vào vùng đâm kim để lấy giọt máu ra.

Thận trọng khi sử dụng

- Giọt máu sẽ bị đông khi tiếp xúc với không khí. Ngay lập tức tiến hành xét nghiệm với giọt máu đã lấy.

5. Tháo kim đã sử dụng ra khỏi bút lấy máu MEDISAFE FINETOUGH II bằng cách đẩy lẫy để đưa kim ra. Thải bỏ kim lấy máu đã sử dụng và các vật dụng nhiễm bẩn vào đúng thùng chứa ngay sau khi sử dụng để tránh bị kim đâm hoặc lâu nhiễm cho người khác.

Thận trọng khi sử dụng

- Kim có thể rơi ra ngoài đầu kim lấy máu nếu kim lấy máu bị va đập mạnh khi thải bỏ
- Nếu sản phẩm không thể được sử dụng đúng cách, vui lòng ngừng sử dụng và thay thế bút bấm kim MEDISAFE FINETOUGH II mới.

Hướng dẫn vệ sinh

Làm sạch thiết bị MEDISAFE FINETOUGH II bằng dung dịch làm sạch mềm mại hoặc khăn mềm ẩm có thấm nước. Ngoài ra, có thể lau bề mặt thiết bị MEDISAFE FINETOUGH II bằng ethanol, cồn isopropyl hoặc chlorhexidine gluconate theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất các dung dịch này. Không ngâm thiết bị trong dung dịch.

Điều kiện bảo quản

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với nước và ánh nắng mặt trời
- Không để ở nơi có nhiệt độ hoặc độ ẩm cao

Tham chiếu trước khi sử dụng

Thử nghiệm trong nhà, khoảng 10000 lần trong điều kiện sử dụng thường

Đóng gói

1 chiếc/hộp

Báo cáo sự cố

Nếu trong quá trình sử dụng thiết bị hoặc do đã sử dụng thiết bị, đã xảy ra sự cố nghiêm trọng vui lòng thông báo với nhà máy và/hoặc đại diện được ủy quyền của nhà sản xuất và cơ quan quốc gia của bạn.