

Dây truyền dịch cho máy truyền dịch Terufusion Solution Administration Set for Infusion Pump

Tốc độ nhỏ giọt: 20 giọt / mL

Sản phẩm được tiệt trùng, không chứa pyrogenic trong bao bì chưa được mở hoặc bị hư hỏng.

<CẢNH BÁO>

- Sản phẩm này được sử dụng cho bơm truyền dịch Terufusion.
- Không sử dụng khi bao gói sản phẩm bị hỏng hoặc rách.
- Sử dụng ngay sau khi mở bao gói sản phẩm.
- Không sử dụng nếu không có nắp bảo vệ ở các đầu nối của sản phẩm.
- Hủy bỏ sản phẩm một cách an toàn sau khi sử dụng để tránh lây nhiễm.
- Khuyến cáo sử dụng sản phẩm trong khoảng thời gian 24 giờ vì lưu lượng truyền có thể không đúng như cài đặt ban đầu do sự thay đổi của dây bên trong bơm sau một thời gian sử dụng dài.
- Chỉ sử dụng 1 lần. Không sử dụng lại. Không tiệt trùng lại. Không tái chế.
- Sự tái chế không đảm bảo tính tiệt trùng, tính tương thích sinh học và tính năng toàn vẹn của sản phẩm
- **KHÔNG ĐỂ SẢN PHẨM TẠI NƠI CÓ ÁNH SÁNG MẠNH VÀ ĐỘ ẨM CAO. TRÁNH TRỰC TIẾP DƯỚI ÁNH MẶT TRỜI.**

<HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG>

Cảnh báo:

- Trước khi thực hiện các bước hướng dẫn dưới đây, lắp kim truyền tĩnh mạch vào phần kết nối dây truyền;
 - Đọc kỹ hướng dẫn của nhà sản xuất và cảnh báo sử dụng, khi kết nối dây truyền dịch với các thiết bị như: kim truyền tĩnh mạch, bộ dây truyền với kim truyền có cánh, kim luồn tĩnh mạch, catheter tĩnh mạch trung tâm và bơm truyền dịch.
- 1) Nếu kết nối bộ dây truyền dịch với bình chứa dạng chai, thì phải sử dụng kim đuổi khí. Giữ chai truyền với đầu ra. Tháo nắp bảo vệ ra khỏi kim đuổi khí. Lắp kim thẳng và sâu vào nắp cao su của chai truyền ở vị trí được đánh dấu tròn. Với bộ dây truyền không có sẵn kim đuổi khí, sử dụng kim đuổi khí phù hợp.
 - 2) Khóa kẹp con lăn trên đường truyền. Bỏ nắp bảo vệ ở đầu nhọn của dây truyền dịch. Gắn đầu nhọn thẳng và sâu vào nắp cao su của chai truyền ở vị trí được đánh dấu tròn
Cảnh báo: Không được cắm đầu nhọn vào chai truyền theo hướng nghiêng để tránh làm cong hoặc gãy đầu nhọn.
 - 3) Treo chai truyền đã được gắn với bộ dây truyền dịch lên cọc truyền. Dùng ngón tay bóp nhẹ bầu đếm giọt và nhả ra cho tới khi dịch đầy ½ bầu đếm giọt.
 - 4) Mở kẹp đường truyền. Đảm bảo dịch đã đi đến cuối dây truyền, rồi khóa hoàn toàn đường truyền.
 - 5) Đảm bảo dây truyền đã được kết nối chặt chẽ với kim truyền tĩnh mạch (hoặc thiết bị kết nối). Rồi tháo nắp bảo vệ ở đầu kim và tiến hành lấy ven tĩnh mạch.
 - 6) Mở khóa đường truyền để bắt đầu truyền.