

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

DỤNG CỤ LẤY MÁU MẪU

Mô tả/Thiết kế

- Dụng cụ lấy máu mẫu của Terumo được dùng để lấy mẫu máu thành phẩm hoặc mẫu thành phần từ túi máu Teruflex hoặc túi truyền hoặc từ một vật dụng chứa máu trong đương.
- Sau khi lấy mẫu, máu và các thành phần máu sẽ được sử dụng theo các quy tắc và tiêu chuẩn của từng vùng để truyền máu.
- Dụng cụ đã được tiệt trùng bằng khí EO. Được tiệt trùng và đóng kín nguyên vẹn.
- Dùng để làm đường dẫn cho chất lỏng không sinh nhiệt

Lưu ý

- Chỉ sử dụng một lần để tránh nhiễm khuẩn
- Không sử dụng nếu vỏ hoặc dụng cụ bị hư hỏng hoặc nhiễm bẩn
- Không được lưu trữ ở nhiệt độ và độ ẩm quá cao. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng
- Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
- Chỉ sử dụng một lần. Không tái sử dụng. Không được tiệt khuẩn lại. Không được tái chế lại. Việc tái chế có thể ảnh hưởng đến khâu tiệt trùng, tương thích sinh học và việc tích hợp các tính năng của dụng cụ

Hướng dẫn sử dụng

1. Chọn kỹ thuật vô trùng để sử dụng
2. Tháo dụng cụ lấy máu mẫu ra khỏi vỏ
3. Mở đầu ra túi máu hoặc túi truyền
4. Tháo đầu bảo vệ ra khỏi dụng cụ lấy máu mẫu bằng cách xoắn ra và sau đó đâm kim của dụng cụ lấy máu mẫu ngập hoàn toàn trong đầu ra của túi máu hoặc túi truyền
5. Tháo vỏ ở đầu lấy mẫu và bề mặt cao su được khử khuẩn của dụng cụ lấy máu mẫu, sau đó đâm kim tiêm vào và lấy mẫu ra

Lưu ý: Không được tháo dụng cụ lấy máu mẫu ra khỏi túi máu hoặc túi truyền