

TERUMO

TERUFUSION™

BLOOD ADMINISTRATION SET for infusion pump

DÂY TRUYỀN MÁU CHO MÁY TRUYỀN DỊCH

Terumo Maintenance Code



TB65EU300C1

STERILE EO



±0,1ml

For TERUFUSION PUMPS

BIỂU TƯỢNG CHỈ DẪN



Không sử dụng nếu
bao bì bị hỏng

P

Áp suất



Số giọt trên ml

STERILE EO

Khử khuẩn bằng
ethylene oxide

~~LATEX~~

Không chứa Latex



Số lượng đóng gói



Không chất gây sốt




Không tái sử dụng

CHỈ ĐỊNH SỬ DỤNG

Sản phẩm được thiết kế sử dụng một lần để truyền máu bằng cách sử dụng máy truyền dịch hoặc phương pháp truyền trọng lực, và phải được thải bỏ sau khi sử dụng.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

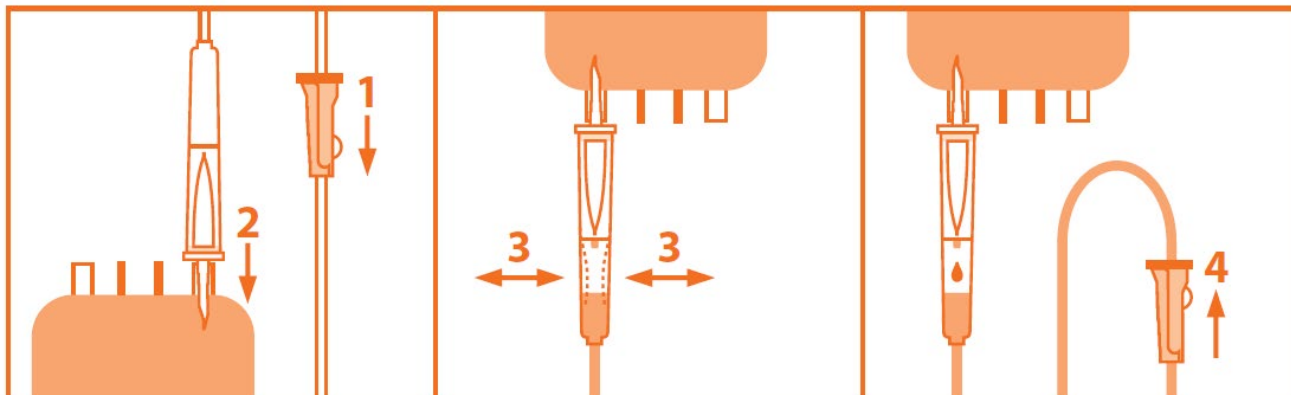

- 1- Khóa đường truyền bằng con lăn trên dây truyền máu.
- 2- Sau đó tháo nắp bảo đầu nhọn rồi cắm sâu vào túi máu theo hướng thẳng (1 chiều hoặc 2 chiều)
- 3- Đảm bảo túi máu đã được kết nối chắc chắn với dây truyền máu, để máu chảy vào bầu đếm giọt. Dùng ngón tay bóp nhẹ vào bầu đếm giọt của dây truyền dịch của dây truyền máu để máu lưu thông chảy về bầu đếm giọt đến một nửa bầu
- 4- Mở khóa đường truyền, tới khi máu lưu thông chảy đến đầu kim thì khóa đường truyền lại
- 5- Mở nắp bảo vệ đầu kim. Thực hiện lấy ven. Mở khóa đường truyền để bắt đầu quá trình truyền máu. Cuối cùng, mở nắp bộ lọc khí, để bắt đầu truyền máu. (vì lý do TB * PU300SE & TB * PU300SYE không có bộ lọc khí nên bỏ qua bước mở nắp)



Nếu trường hợp dây truyền máu cho bơm tiêm điện có kẹp AFF, chu trình hoạt động có thể như sau:

1. Đảm bảo rằng kẹp AFF không bị khóa
2. Kéo kẹp AFF xuống
3. Đảm bảo rằng ống được đặt trong kẹp AFF như được chỉ ra trong Hình 1 A và lắp kẹp vào lỗ chuyên dụng của bơm dịch truyền
4. Sau đó gắn ống đúng vào các khe dẫn ống, đóng bơm để truyền dịch sau khi đã đặt đúng cách

Lưu ý thận trọng: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

THẬN TRỌNG

- Chỉ sử dụng một lần
- Không tái sử dụng
- Không tiết trùng lại
- Không tái chế sản phẩm. Việc tái chế có thể ảnh hưởng đến tính vô trùng, khả năng tương thích sinh học và tính toàn vẹn chức năng của thiết bị.

BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Không sử dụng nếu nắp bảo vệ đầu kim bị mất hoặc biến dạng
- Sử dụng ngay sau khi mở nắp từng đơn vị đóng gói
- Thải bỏ an toàn sau khi sử dụng để tránh nguy cơ nhiễm trùng.
- Đảm bảo tất cả các kết nối với Dây truyền máu được chắc chắn
- Không lật ngược hoặc lắc buồng nhỏ giọt trong quá trình sử dụng
- Khử trùng cổng tiêm trước khi sử dụng.
- Nên thay bộ này sau mỗi 24 giờ sử dụng, vì tốc độ dòng chảy có thể lệch khỏi giá trị cài đặt do sự biến dạng của phần ống trong máy bơm sau thời gian dài sử dụng.

PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN

Không bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ cao



TERUMO MEDICAL PRODUCTS (HANGZHOU) CO., LTD.

M4-9-5 Hangzhou Economic and Technological Development Zone, 310018 Hangzhou, P.R.CHINA
MADE IN CHINA

AU Sponsor **Terumo Australia Pty Ltd** Macquarie Park NSW 2113 Australia T: +61 2 98785122

Tất cả các tên thương hiệu đều là thương hiệu đã đăng ký của TERUMO CORPORATION và các chủ sở hữu tương ứng của chúng.