



TB69A000C2

2023-05/Rev.1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TERUMO

TERUFUSION

CE 0123

MD



STERILE EO

VOL

8ml(40°C)
11ml(40°C/2 bar)



BLOOD ADMINISTRATION SET for infusion pump

DÂY TRUYỀN MÁU CHO MÁY TRUYỀN DỊCH

TB*PU300SE




TB*PU300SYE



TB*PU300W






TB*PU300WY

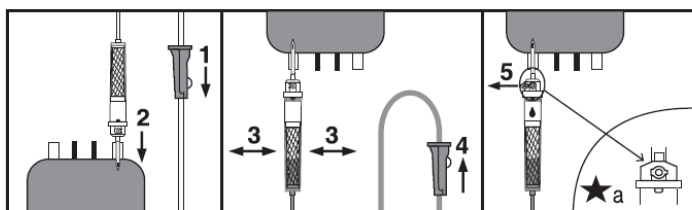

★ b

Hình 1

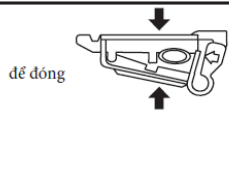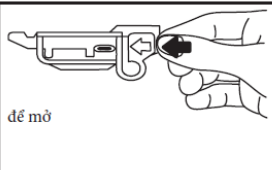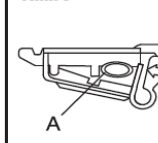

THẬN TRỌNG

- Không sử dụng nếu nắp bảo vệ đầu kim bị mất hoặc biến dạng
- Không sử dụng nếu bao bì sản phẩm bị hư hỏng

- Sử dụng ngay sau khi mở nắp từng đơn vị đóng gói
- Thải bỏ an toàn sau khi sử dụng như là rác thải y tế theo quy định của cơ sở y tế địa phương để tránh nguy cơ nhiễm trùng.
- Đảm bảo tất cả các kết nối với Dây truyền máu cho bơm truyền dịch đều chắc chắn
- Không lật ngược hoặc lắc buồng nhỏ giọt trong quá trình sử dụng
- Khử trùng cổng tiêm trước khi sử dụng.
- Nên thay bộ dây này sau mỗi 24 giờ sử dụng, vì tốc độ dòng chảy có thể lệch khỏi giá trị cài đặt do sự biến dạng của phần ống trong máy bơm sau thời gian dài sử dụng.
- Chỉ sử dụng một lần
- Không tái sử dụng
- Không tiệt trùng lại
- Không tái chế sản phẩm. Việc tái chế có thể ảnh hưởng đến tính vô trùng, khả năng tương thích sinh học và tính toàn vẹn chức năng của thiết bị.
- Sản phẩm này được tiệt trùng bằng khí etylen oxid.

KHÔNG BẢO QUẢN SẢN PHẨM Ở NHIỆT ĐỘ CAO.

- Không tháo kẹp chống dòng chảy tự do (kẹp AFF) ra khỏi bộ dây truyền máu.
- Không kéo kẹp lên hoặc xuống khi kẹp đang đóng.
- Đảm bảo chỉ sử dụng sản phẩm với bơm Terumo Terufusion Midpress (với kẹp AFF nếu cần).
 - a. Nếu có bộ lọc không khí, vui lòng mở khóa nắp bộ lọc như hướng dẫn ở bước 5;
 - b. Nếu có kẹp AFF, 1. Đảm bảo kẹp AFF không bị khóa. 2. Kéo kẹp AFF xuống; 3. Đảm bảo rằng ống được đặt trong kẹp AFF như hướng dẫn trong Hình 1 A và lắp kẹp vào lỗ chuyên dụng của bơm dịch truyền. Sau đó gắn ống đúng vào các khe dẫn ống. Lưu ý thận trọng: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

<BÁO CÁO KHIẾU NẠI> Nếu trong quá trình sử dụng thiết bị hoặc sau khi sử dụng, có xảy ra một sự cố nghiêm trọng, vui lòng báo cáo cho nhà sản xuất và/hoặc cơ sở đại diện được ủy quyền và cơ quan quản lý tại quốc gia của bạn.

Sản phẩm được thiết kế sử dụng một lần để truyền máu hoặc chế phẩm máu bằng cách sử dụng bơm truyền dịch hoặc phương pháp truyền trọng lực.



Chỉ dùng cho
Bơm Terufusion
Midpress



Khóa dòng
chảy tự do



20
giọt/phút



Tham khảo HDSD



Không sử dụng
nếu bao bì bị
hư hỏng



An toàn sử dụng cho
bơm Terufusion. Thể
tích bảo quản ở 40°C;
200kPa: 11ml/1m



Không chứa
Latex



Không chứa
DEHP



Không chứa
chất gây sốt



Thiết bị y tế



Hệ thống bảo vệ
tiệt trùng duy nhất



Đầu nối
khóa Luer



Nhà sản xuất



Áp suất



Bộ lọc dung dịch với lỗ 200 µm

TERUMO MEDICAL PRODUCTS (HANGZHOU) CO., LTD.
M4-9-5 Hangzhou Economic and Technological Development Zone, 310018 Hangzhou, P.R.CHINA SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC
www.terumo-labeling.com

EC REP TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM
AU Sponsor Terumo Australia Pty Ltd Macquarie Park NSW 2113 Australia

Tất cả các tên thương hiệu đều là thương hiệu đã đăng ký của TERUMO CORPORATION và các chủ sở hữu tương ứng của chúng.