

Dây truyền máu

Chủng loại: Terufusion Blood Administration Set

Coban thuộc phân nhóm CMR1B có mặt trong kim luồn với tỷ lệ 0,1% khối lượng/khối lượng. Các bằng chứng khoa học hiện tại chứng minh rằng các thiết bị y tế được sản xuất từ hợp kim thép không gỉ có chứa coban không làm tăng nguy cơ ung thư hoặc các tác động bất lợi lên sức khỏe sinh sản


<MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG>

Sản phẩm là dây truyền máu sử dụng một lần để chứa máu. Sản phẩm có thể sử dụng trực tiếp và sử dụng một lần.

<CẢNH BÁO>

- Thiết bị này chứa DEHP. Dựa trên các nghiên cứu trên động vật, việc tiếp xúc với DEHP vượt mức cho phép có thể gây trở ngại cho sự phát triển bình thường của hệ thống sinh dục nam. Đối với trẻ em, phụ nữ mang thai và cho con bú, có thể xem xét thay thế các thiết bị khác.
- Không sử dụng sản phẩm nếu bao gói sản phẩm bị hỏng hoặc bẩn
- Không sử dụng sản phẩm nếu các đầu bảo vệ thiết bị bị lỏng hoặc tháo rời
- Không lưu trữ sản phẩm ở những nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao
- Thải bỏ sản phẩm một cách an toàn sau khi sử dụng 1 lần theo quy định của địa phương để tránh nguy cơ phơi nhiễm.
- Sản phẩm sử dụng 1 lần. Không được tái sử dụng
- Không tiệt trùng lại. Không tái chế
- Việc tái chế có thể ảnh hưởng đến tính vô trùng, khả năng tương thích sinh học và tính toàn vẹn chức năng của thiết bị.
- Báo các sự cố nghiêm trọng của thiết bị tới cơ quan địa phương

<HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG>

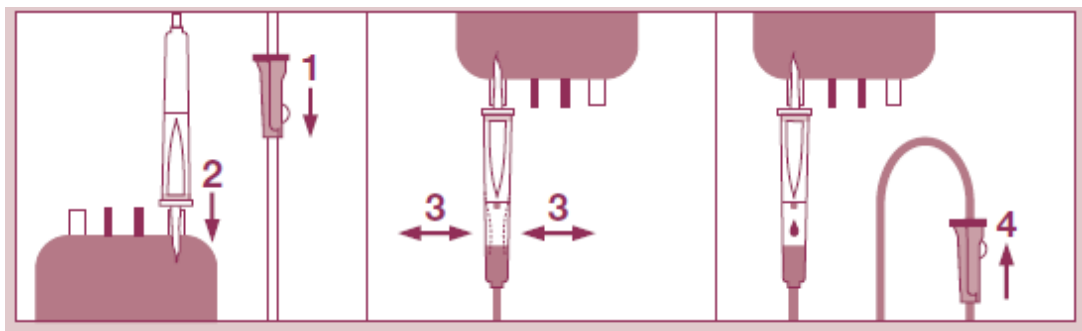

- Khóa đường truyền bằng con lăn trên dây truyền máu, sau đó tháo nắp bảo đầu nhọn rồi cắm sâu vào túi máu theo hướng thẳng.
- Đảm bảo túi máu đã được liên kết chặt chẽ với dây truyền máu. Dùng ngón tay bóp nhẹ vào bầu đếm giọt của dây truyền máu để máu lưu thông chảy về bầu đếm giọt đến một nửa bầu.
- Mở khóa đường truyền, tới khi máu lưu thông chảy đến đầu kim thì khóa đường truyền lại.
- Mở nắp bảo vệ ở đầu kim. Thực hiện lấy ven.
- Mở khóa đường truyền để bắt đầu quá trình truyền máu.



 **TERUMO CORPORATION**
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JAPAN MADE IN JAPAN

  **TERUMO BCT EUROPE N.V.** Ikaroslaan 41, 1930 Zaventem, BELGIUM