

# Kim lấy máu đo đường huyết

Cobalt được phân loại là CMR 1B có mặt trong kim tiêm với hàm lượng trên 0,1% theo khối lượng. Các bằng chứng khoa học hiện tại cho thấy thiết bị y tế được sản xuất từ hợp kim thép không gỉ chứa cobalt không gây tăng nguy cơ ung thư hoặc tác động bất lợi đến khả năng sinh sản.

## Mục đích sử dụng

Kim lấy máu dùng để lấy mẫu máu cho thử đường huyết.

## ■ TRẬN TRỌNG

- Chỉ sử dụng với Bút bấm kim lấy máu Medisafe Finetouch
- Trước khi dùng, đọc hướng dẫn sử dụng của Bút bấm kim lấy máu Medisafe Finetouch
- Thải bỏ kim một cách an toàn sau khi sử dụng một lần, tuân theo quy định địa phương để tránh nguy cơ nhiễm trùng.
- Chỉ sử dụng 1 lần. Không tái sử dụng. Không tiệt trùng lại. Không xử lý lại.
- Việc xử lý lại có thể làm ảnh hưởng tính vô trùng, tương thích sinh học và toàn vẹn chức năng của thiết bị.
- Sản phẩm này không có yêu cầu đặc biệt về xử lý hoặc bảo quản liên quan đến nhiệt độ và độ ẩm.
- Để xa tầm tay trẻ em.

## ■ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

