

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG****MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG**

Sản phẩm được sử dụng với bút tiêm insulin là kim tiêm insulin tiết trùng sử dụng một lần được chỉ định để tiêm insulin cho bệnh nhân đái tháo đường.

**HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG**

- Mở tách màng bao của kim
- Lắp kim vào bút bằng cách ấn thẳng xuống bằng nắp bảo vệ bên ngoài (không ấn vào góc)
- Tháo nắp bảo vệ bên ngoài bằng cách giữ và kéo thẳng nắp
- Tháo nắp bảo vệ bên trong
- Đâm kim nhanh vào da và tiêm chậm
- Thay nắp bảo vệ bên ngoài cẩn thận (nếu chỉ tự tiêm).
- Tháo kim và vứt bỏ một cách an toàn theo khuyến cáo của bác sĩ hoặc dược sĩ

**⚠ CẢNH BÁO**

Không cho trẻ em sử dụng thiết bị này nếu không có sự giám sát của cha mẹ

**Tránh nhiễm trùng**

- Không sử dụng kim nếu lớp niêm phong bị phá hủy hoặc đã bị mở
- Không sử dụng kim khi ngày hết hạn ghi trên bao hết hạn
- Trước mỗi lần tiêm: Vệ sinh sạch vị trí tiêm theo hướng dẫn của bác sĩ
- Mỗi kim chỉ sử dụng một lần
- Không tái sử dụng, làm sạch và/ hoặc tiết trùng lại kim
- Cẩn thận thay thế nắp bảo vệ ngoài trên kim đã sử dụng và thải bỏ ngay khi đã tự sử dụng tuân theo khuyến cáo của bác sĩ cho việc thải bỏ đúng cách của địa phương
- Nếu không tuân theo hướng dẫn này, có thể xảy ra nguy cơ nhiễm trùng
- Hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Không được sử dụng bút của người khác.
- Để tránh vô tình bị kim đâm, có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng, không được đập nắp, tháo hoặc phá hủy kim đã được người khác sử dụng

**Lấy đúng liều sử dụng**

- Tham khảo bác sĩ về chiều dài kim phù hợp với bạn
- Chuẩn bị bút tiêm theo hướng dẫn sử dụng trước mỗi lần tiêm để đảm bảo kim tiêm có thể bơm thuốc dễ dàng
- Tiêm chậm theo hướng dẫn của bác sĩ và hướng dẫn sử dụng của sản phẩm
- Kiểm tra sau mỗi lần tiêm xem thuốc có nhỏ giọt từ kim tiêm, bút tiêm hay vị trí tiêm hay không.
- Nếu thuốc nhỏ giọt, thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ về cách xử lý tình trạng thuốc không đủ liều.
- Hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế nếu bạn có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào. Tránh để cong kim hoặc gãy kim
- Không thay đổi hướng của kim trong khi đưa vào hoặc rút kim ra khỏi da.
- Hãy tìm kiếm sự hỗ trợ y tế ngay lập tức nếu kim gãy bị kẹt lại trong cơ thể hoặc biến mất dưới da.

**TIÊM AN TOÀN VÀ THOẢI MÁI**

- Thay đổi vị trí tiêm thường xuyên theo chỉ dẫn của bác sĩ. Nếu không thực hiện, mô có thể bị cứng lại.
- Tiêm thuốc tại nhiệt độ phòng
- Đảm bảo không có bọt khí còn trong bút trước khi tiêm
- Đợi cho đến khi cồn tại chỗ (nếu sử dụng) bay hơi hoàn toàn trước khi tiêm
- Giữ cơ ở trạng thái thư giãn khi tiêm
- Đâm kim nhanh vào da
- Không thay đổi hướng của kim trong khi đưa vào hoặc rút kim ra khỏi da
- Không tái sử dụng kim

**CÁC BÚT TIÊM TƯƠNG THÍCH**

TÊN BÚT TIÊM	TÊN BÚT TIÊM
Apidra SoloStar	NovoLogMix70/30 FlexPen
Lantus SoloStar	Victoza Pen
Humalog KwikPen	NovoPen 3
HumalogMix 50/50 KwikPen	NovoPen 4
HumalogMix 75/25 KwikPen	NovoPen Echo
Humulin N Pen	NvoPen Junior
Humulin 70/30 Pen	Byetta Pen 5mcg
HumaPen Luxura	Byetta Pen 10mcg
Forteo	SymlinPen 60
Levemir FlexPen	SymlinPen 120
NovoLog FlexPen	AutoPen

**Mô tả biểu tượng trên nhãn**

"Nhà sản xuất"



"Hạn sử dụng"



"Chú ý, xem hướng dẫn sử dụng"



"Tham khảo đường dẫn sử dụng"



"Không sử dụng nếu bao bì bị phá hủy"



"Không tái sử dụng"



"Số lô"



"Tiệt trùng bằng khí Ethylene oxid"



"Tránh ánh nắng mặt trời"



"Giữ khô ráo"



"Nhiệt độ phòng: 1~30°C"



"Nhập khẩu"



"Phân phối"

**ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN**

- Bảo quản nơi khô ráo
- Tránh ánh nắng mặt trời
- Bảo quản dưới nhiệt độ phòng.

**Tae-Chang Industrial Co., Ltd.****127, Sanho-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, Korea**