

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết

MEDISAFE FIT Control solution

Dùng với Máy đo đường huyết cá nhân MEDISAFE FIT.

Hướng dẫn sử dụng

Khuyến cáo khi sử dụng

- Không nuốt vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết MEDISAFE FIT (sau đây gọi là "dung dịch") hoặc nhỏ dung dịch vào mắt.
- Nếu dung dịch đã tiếp xúc với mắt hoặc miệng, hãy rửa sạch dung dịch bằng nước. Nếu bạn cảm thấy bất kỳ dấu hiệu gì bất thường, hãy hỏi ý kiến bác sĩ.
- Nếu dung dịch đã tiếp xúc với tay hoặc quần áo của bạn, hãy rửa sạch bằng nước.
- Để xa tầm tay trẻ em
- Tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp.
- Bảo quản sản phẩm ở nhiệt độ 1-30 ° C. Nếu bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh hoặc tương tự, hãy để nhiệt độ dung dịch tăng đến nhiệt độ phòng (20-30 ° C) trước khi sử dụng.
- Không để đông lạnh sản phẩm.
- Nếu vẫn chưa mở nắp lọ, hạn dùng là 1 năm kể từ ngày sản xuất. Khi đã quá hạn sử dụng in trên nhãn hộp hoặc lọ sản phẩm thì không được sử dụng sản phẩm nữa ngay cả khi lọ sản phẩm còn chưa mở.
- Ghi ngày mở nắp trên nhãn lọ. Sử dụng sản phẩm trong vòng 3 tháng sau khi mở. Tuy nhiên, nếu hết hạn sử dụng in trên nhãn hộp và lọ trước 3 tháng sau ngày mở thì chỉ sử dụng sản phẩm cho đến ngày hết hạn.
- Sản phẩm này được sử dụng với Máy đo đường huyết MEDISAFE FIT và Đầu thử đường huyết MEDISAFE FIT.
- Khi sử dụng ở các vùng cao (ví dụ ở vùng miền núi), có thể có chênh lệch trong kết quả thử nghiệm.

Tóm tắt và giải thích

Sản phẩm này là một dung dịch chứa glucose. Nó được sử dụng để xác nhận rằng Máy đo đường huyết cá nhân MEDISAFE FIT và Đầu thử đường huyết MEDISAFE FIT hoạt động đúng chức năng. Khi được sử dụng cho Máy đo đường huyết cá nhân MEDISAFE FIT, hãy sử dụng sản phẩm cùng với đầu thử đường huyết được chỉ định (Đầu thử đường huyết MEDISAFE FIT).

Dung dịch này có ba mức nồng độ (L: khoảng 40 mg/dL, M: khoảng 120 mg/dL, H: khoảng 300 mg /dL). Hãy sử dụng chất chuẩn có nồng độ theo chỉ định của bác sĩ.

Trước khi sử dụng dung dịch, hãy đọc kỹ không chỉ hướng dẫn sử dụng dung dịch này mà còn các hướng dẫn sử dụng Máy đo đường huyết MEDISAFE FIT và Đầu thử máy đo đường huyết MEDISAFE FIT.

Nồng độ

Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết MEDISAFE FIT 4 mL/lọ

Nồng độ (L, M, H) được in trên nhãn hộp và lọ

Thành phần

Sản phẩm này là dung dịch chứa glucose và natri carboxymethylcellulose.

Cách dùng

Khi sử dụng lọ sản phẩm mới, hãy viết ngày mở nắp trên nhãn lọ. Ngày hết hạn là 3 tháng sau khi mở nắp lọ.

Trước khi sử dụng, hãy xác nhận rằng lọ dung dịch chưa mở quá ba tháng hoặc chưa hết hạn sử dụng ghi trên nhãn lọ.

Thực hiện xét nghiệm ở 20-30° C.

1. Thiết lập Máy đo ở chế độ đo bằng vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết.
2. Bóc bỏ hết màng bọc của hộp đầu thử và gắn đầu thử vào máy đo. Sau đó, kéo thẳng hộp đầu thử ra.
Kiểm tra đảm bảo Máy đo sẵn sàng để tiến hành xét nghiệm.
3. Nhỏ một giọt sản phẩm vào màng bọc (mặt bạc). Giọt dung dịch có thể có đường kính từ 5-6mm. Khi đưa đầu dẫn của đầu thử vào giọt dung dịch, vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết được hút lên và quá trình đếm ngược bắt đầu ngay lập tức. Sau khi quá trình đếm ngược bắt đầu, ngay lập tức lấy đầu thử ra khỏi dung dịch và nhẹ nhàng đặt Máy đo sang một bên
4. Sau khi đếm ngược, thu được kết quả thử nghiệm theo thời gian, hãy xác nhận rằng kết quả nằm trong phạm vi cho phép của dung dịch chuẩn có nồng độ nhất định in trên nhãn gắn vào hộp đầu thử.
5. Để tháo đầu thử ra, hãy đặt đầu thử vào hộp đầu thử trống khi đầu thử vẫn còn gắn vào Máy đo. Trượt về phía cần đẩy và đẩy đầu thử đã dùng vào trong hộp đầu thử.
6. Nếu kết quả không nằm trong phạm vi cho phép, hãy lặp lại các bước từ 1 đến 5 bằng đầu thử mới để thử nghiệm lại.
7. Nếu thử nghiệm bằng vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết có nồng độ khác nhau, hãy lặp lại các bước từ 1 đến 5 bằng một đầu thử mới.
8. Kết quả xét nghiệm sẽ được ghi trong hồ sơ.
9. Sau khi đo hãy tắt nguồn.
10. Sau khi sử dụng vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết, hãy miệng lọ bằng giấy sạch hoặc các loại tương tự đồng thời vặn chặt nắp.
Không để miệng lọ thẳng đứng khi không có nắp.

Các khuyến cáo khác

- Tiến hành thử nghiệm theo thời gian quy định trong hướng dẫn sử dụng Máy đo đường huyết cá nhân MEDISAFE FIT.
- Không trực tiếp sử dụng chất chuẩn từ ống dẫn của lọ đến ống dẫn của đầu thử.
- Bắt đầu thử nghiệm ngay sau khi nhỏ chất chuẩn lên màng bọc
- Sản phẩm này có thể được sử dụng cho khoảng 60 lần thử nghiệm. Nếu lượng còn lại rất ít thì hãy sử dụng lọ mới
- Tuân thủ các quy định về xử lý chất thải của cộng đồng địa phương nơi bạn sinh sống hoặc tại một cơ sở nhất định khi xử lý dung dịch thải.

Kết quả thử nghiệm

Nếu kết quả thử nghiệm không nằm trong phạm vi cho phép của vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết với nồng độ nhất định được in trên nhãn gắn vào hộp đầu thử, hãy thực hiện thử nghiệm lại bằng đầu thử mới. Khi tiến hành thử nghiệm lại thì hãy nhỏ giọt vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết mới. Nếu thử nghiệm lại vẫn báo "FAILED" (KHÔNG THÀNH CÔNG) thì có thể là do các nguyên nhân liệt kê dưới đây.

| Nguyên nhân | Biện pháp khắc phục |
|---|---|
| Không tiến hành thử nghiệm đúng cách | Tiến hành thử nghiệm theo hướng dẫn sử dụng sản phẩm, hướng dẫn sử dụng Máy đo đường huyết cá nhân MEDISAFE FIT và hướng dẫn sử dụng đầu thử đường huyết MEDISAFE FIT |
| vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết đã hết hạn hoặc đã mở nắp lọ quá 3 tháng | Sử dụng lọ sản phẩm mới |
| Có vấn đề trong việc bảo quản vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng đường huyết | Sử dụng sản phẩm mới. Bảo quản sản phẩm đúng cách theo chỉ dẫn trong tài liệu này. |
| Có vấn đề về đầu thử đường huyết MEDISAFE FIT hoặc Máy đo đường huyết cá nhân MEDISAFE FIT | Tham khảo phản xử lý sự cố. Nếu không thể xử lý sự cố về Máy đo đường huyết cá nhân MEDISAFE FIT, vui lòng liên hệ TERUMO. |



Sử dụng trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp



TERUMO

TERUMO CORPORATION
44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, JAPAN MADE IN JAPAN
TERUMO EUROPE N.V., Interleuvenlaan 40, 3001 LEUVEN, BELGIUM

Tất cả thương hiệu là thương hiệu hoặc thương hiệu được đăng ký thuộc sở hữu của TERUMO CORPORATION và các chủ sở hữu tương ứng

©TERUMO CORPORATION Tháng 11-2020 20C12

