

❖ **Mục đích sử dụng:** Dây truyền dịch tĩnh mạch dùng một lần có mục đích truyền dịch từ bình chứa vào hệ thống mạch máu của bệnh nhân thông qua kim hoặc ống thông được đưa vào tĩnh mạch.

❖ **Hướng dẫn sử dụng:**

1. Khóa bộ điều chỉnh lại và tháo bỏ nắp kim ống.
2. Cắm kim ống vào bình chứa theo chiều thẳng đứng.
3. Treo bình chứa lên.
4. Bóp và nhả ống truyền dịch đến khi lấy được lượng dịch mong muốn.
5. Nới lỏng khóa điều chỉnh để đẩy hết không khí ra khỏi dây truyền dịch.
6. Khóa chặt bộ điều chỉnh lại.
7. Kết nối đầu nối với thiết bị tiêm truyền tĩnh mạch.
8. Dùng nút điều chỉnh để thay đổi tốc độ truyền dịch theo ý muốn

Cảnh báo và thận trọng:

- ❖ Không sử dụng khi bao bì bị rách hoặc hư hỏng.
- ❖ Không sử dụng khi lớp bảo vệ tiệt trùng bị hở hoặc hỏng.
- ❖ Không đặt các vật không vô trùng vào khu vực vô trùng.
- ❖ Không để không khí bị giữ lại bên trong bộ truyền dịch.
- ❖ Làm thùng sản phẩm này ở bất kỳ điểm nào cũng có thể khiến bong bóng khí đi vào cơ thể làm tắc nghẽn tĩnh mạch.
- ❖ Đảm bảo việc cấp thuốc bổ sung phù hợp với dung dịch được truyền vào.

Lưu ý chung:

- ❖ Sản phẩm này có chứa cao su tổng hợp khô.
- ❖ Thay mới sản phẩm này sau mỗi 24 giờ hoặc theo chính sách của bệnh viện.
- ❖ Chỉ sử dụng một lần. Nếu sử dụng lại, sản phẩm sẽ bị nhiễm bẩn. Không tiệt trùng lại.
- ❖ Để tiêm thuốc bổ sung qua cổng tiêm silicon, khuyến nghị sử dụng kim tiêm 18 Gauge (hoặc nhỏ hơn).
- ❖ Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.

