



SA17EA004C2

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Cổng tiêm không kim có dây nối dài cho tiêm, truyền dịch

SURPLUG AD Extension tube

CÁC BIỂU TƯỢNG CHỈ DẪN

PVC Free Không chứa PVC/thành phần tương tác thuốc  Hướng dẫn tư vấn sử dụng  Cổng tiêm SURPLUG AD (T-type)  Van một chiều phía sau	LATEX Free Không chứa Latex  Không tái sử dụng  Van khóa 3 cổng  Màng vi lọc (size 0.2µ)	 Không chất gây sốt  Chủ sở hữu  Cổng tiêm SURPLUG AD (Loại I)  Khóa đầu nối	 Không sử dụng nếu bao bì bị hỏng STERILE EO Khử khuẩn bằng ethylene oxide  Cổng kết nối (Loại mở)  Đầu nối trượt
--	---	--	--


MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Cổng tiêm không kim có dây nối dài cho tiêm, truyền dịch SURPLUG AD Extension tube được sử dụng như một cổng van kết nối với bộ dây truyền dịch hoặc các thiết bị tương tự để tiêm. Sản phẩm cũng được dùng để lấy mẫu máu và truyền máu. SURPLUG AD Extension tube có đường dẫn dịch để ngăn ngừa việc đọng thuốc


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SURPLUG AD EXTENSION TUBE VỚI SURPLUG AD THREE-WAY STOPCOCK

- Các mũi tên bên dưới hiển thị đường dẫn dịch. Điều chỉnh vị trí van khóa phụ thuộc vào việc sử dụng. Đường dẫn dịch sẽ dịch chuyển bằng cách xoay chuyển van khóa.
- Giữ vị trí khóa vò như hình 1c để tránh ứ đọng thuốc trong đường dẫn dịch ngay cả khi không sử dụng.
- Để khóa dòng chảy theo các hướng, điều chỉnh van khóa như hình 2

Hình 1

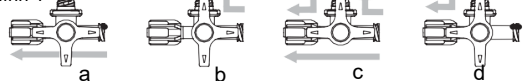

Hình 2

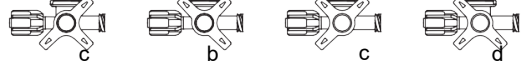

CẢNH BÁO

- Khử trùng cổng van của SURPLUG AD Extension tube trước khi sử dụng.
- Để áp dụng khóa heparin, đóng kẹp hoặc khóa giữa ống thông và SURPLUG AD Extension tube trước khi tháo ống tiêm. Trong khi sử dụng heparin, không mở kẹp hoặc khóa vò đã được đóng lại

THẬN TRỌNG

- Hàng dùng 1 lần. Không tái sử dụng
- Không tiết trùng lại
- Không sử dụng đầu kim để tiêm.
- Vui lòng không sử dụng nếu bao bì đã bị hư hỏng

BẢO QUẢN

Không bảo quản trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, nơi có nhiệt độ và độ ẩm cao.

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA

- Đảm bảo rằng thiết bị được kết nối chắc chắn không bị rời rạc khi sử dụng
- Đưa van khóa về vị trí mở và kết nối với cổng van của Surplug AD extension tube (Như hình 1b/1c/1d)
- Khi kết nối với đầu luer được ở đầu cổng van của thiết bị, đảm bảo rằng có thể lắp và tháo thiết bị theo phương thẳng. Không kết nối ở các góc nghiêng hoặc vị trí xoắn quá mức
- Không sử dụng thiết bị nếu có bộ phận bị hư hỏng
- Đảm bảo rằng bạn không làm hỏng ống bằng cách kẹp chặt ống hoặc sử dụng bất kỳ vật sắc nhọn nào khác.
- Không tác dụng lực quá mạnh lên ống hoặc bộ phận kết nối của ống bằng cách kéo, đẩy hoặc uốn cong ống
- Đảm bảo trong quá trình sử dụng thiết bị không bị đứt gãy, mất kết nối hoặc rò rỉ thuốc
- Vui lòng không sử dụng sản phẩm để tiêm áp lực cao như tiêm thuốc cản quang bằng máy.
- Không kết nối đầu nối có cạnh sắc với cổng van của sản phẩm
- Khi sử dụng đầu nối có gờ lồi quanh đầu, đầu nối có cạnh sắc hoặc một đầu nối có gờ trên cạnh, đảm bảo rằng đường dẫn dòng được nguyên vẹn trước khi bắt đầu tiêm, vì cổng van SURPLUG AD có thể vẫn đóng
- Khi thực hiện truyền hoặc hút nhanh từ một cổng tiêm, hãy thực hiện các biện pháp chặn các bộ truyền dịch khác hoặc các ống nối dài được kết nối với các cổng tiêm khác để ngăn dòng chảy ngược trở lại.
- Hãy cẩn thận vì van một chiều phía sau không ngăn ngừa hoàn toàn được dòng chảy ngược.
- Thay sản phẩm mới khi máu đông làm cho van ba ngã khó xoay.
- Không sử dụng bộ lọc trong dòng cho truyền máu.
- Không sử dụng bộ lọc trong dòng để tiêm thuốc như tương như tương lipid hoặc các thành phần máu.
- Cẩn thận nguy cơ rò rỉ nếu dùng bộ lọc trong dòng để tiêm thuốc chứa dầu, chất hoạt động bề mặt hoặc cồn.
- Thay sản phẩm mới nếu bộ lọc trong dòng không còn đảm bảo tốc độ dòng chảy phù hợp hoặc bị đổi màu trong quá trình sử dụng.

HẠN DÙNG

Xem hạn dùng trên bao bì ngoài sản phẩm



TERUMO MEDICAL PRODUCTS (HANGZHOU) CO., LTD.
M4-9-5 Hangzhou Economic and Technological Development Zone, 310018 Hangzhou, P.R.CHINA